

## EU-9165 据付要領書 INSTALLATION PROCEDURES

SSD-ARIETTA60 用、SSD-ARIETTA70 用アルファニューメリックキーボードユニット  
Alphanumeric keyboard unit for SSD-ARIETTA60 and SSD-ARIETTA70

この据付要領書は、EU-9165 の納品等の際、据付の資料としてご使用ください。  
必要な工具: プラスドライバ(あらかじめ用意すること)

These installation procedures are provided for reference in installation of EU-9165.

Tools required: Phillips screwdriver. (Prepare them beforehand)

### 注意

- 装置の据付作業は、有資格者に限られる。
- 装置を設置する場所の環境条件および電源設備は、取扱説明書の記載条件による。

### CAUTION



- This system must be installed only by the qualified personnel.
- The environmental conditions for the place of installation and the specifications of the power supply must satisfy the requirements stated in the operator's manual.

## 付属品リスト

## List of Accessory Parts


下記の付属品が揃っているか確認してください。


Check all items listed below are included in the shipping case.

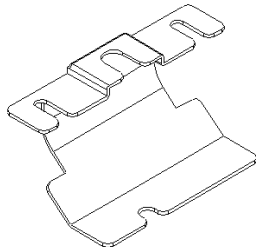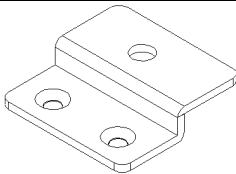No.	品 名 Parts Name	外 観 Appearance	個 数 Quantity
1	キーボードユニット (EU-9165)  keyboard unit (EU-9165)		1
2	接栓金具: MP-FX-AR70-5(2)  Connector Cover MP-FX-AR70-5(2)		1
3	搭載金具 1: MP-FX-AR70-5(3)  Mounting Fixture 1 MP-FX-AR70-5(3)	 ※For SSD-ARIETTA70	1
4	搭載金具 2: MP-FX-AR70-5(18)  Mounting Fixture 2 MP-FX-AR70-5(18)	 ※For SSD-ARIETTA60	1
5	付属ねじ (BNK3×8 Fe-Ni)  Accessory screws (BNK3×8 Fe-Ni)		2
6	付属ねじ (S3×6 Fe-Ni-EC)  Accessory screws (S3×6 Fe-Ni-EC)		2
7	据付要領書 Installation Procedures	-----	1

目次	CONTENTS
1.トレイの取り外し方法	1. Removing of tray
2.キーボードユニットの取り付け方法	2. Installation of Keyboard Unit
3.動作確認	3. Confirmation of the work

1.トレイの取り外し方法	1. Removing of tray
--------------	---------------------

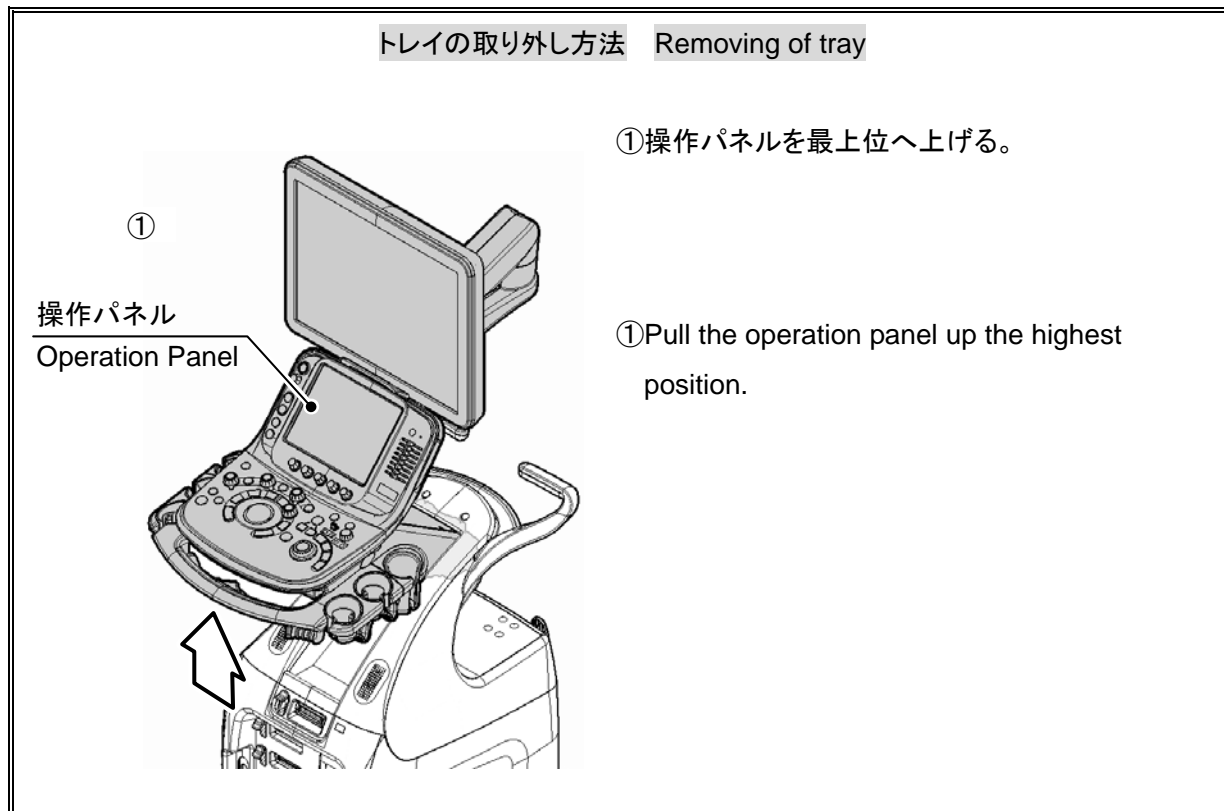

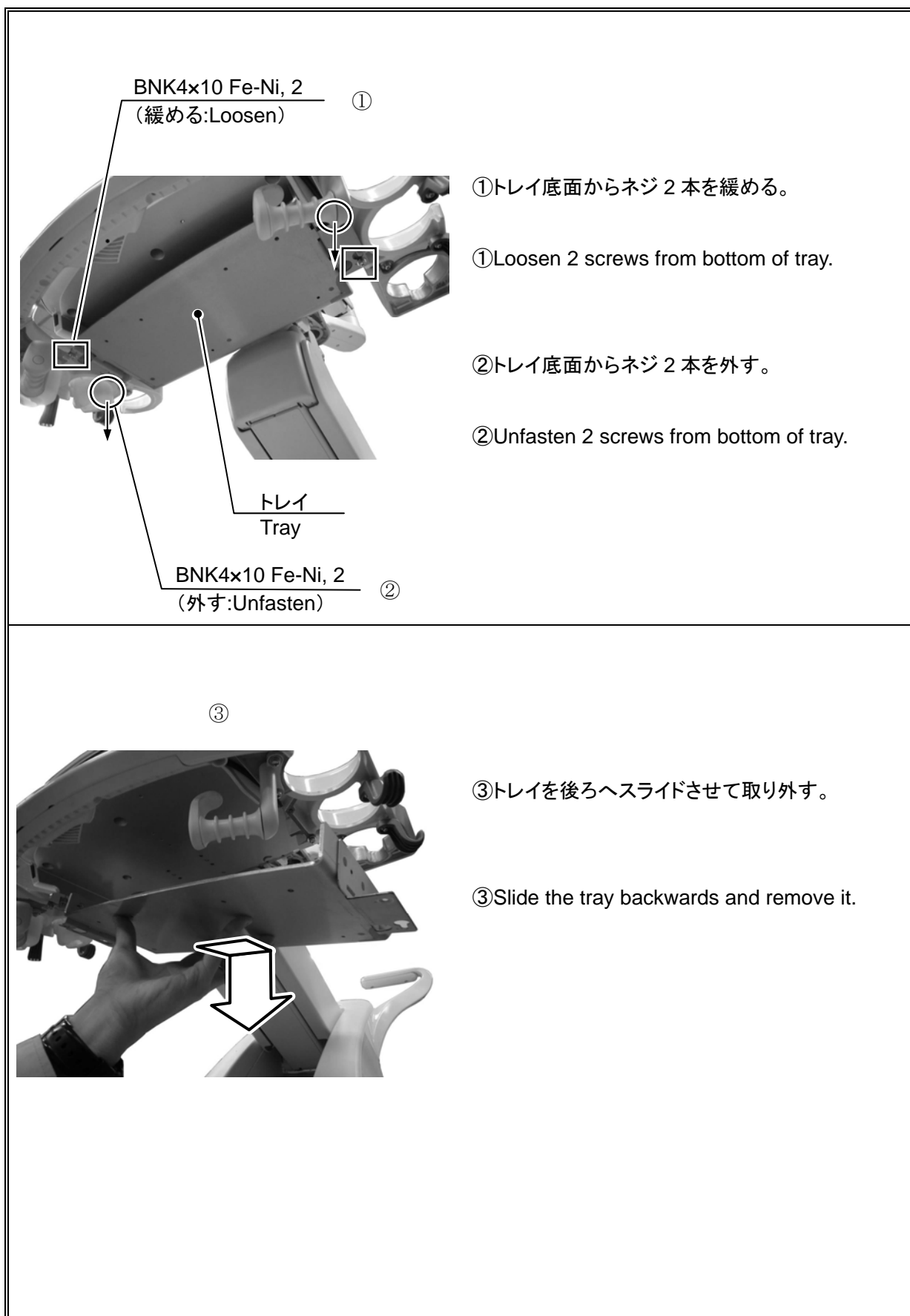


## 2. キーボードユニットの取り付け方法

## 2. Installation of Keyboard Unit

### SSD-ARIETTA70 の場合 In the case of SSD-ARIETTA70

キーボードユニット  
Keyboard Unit

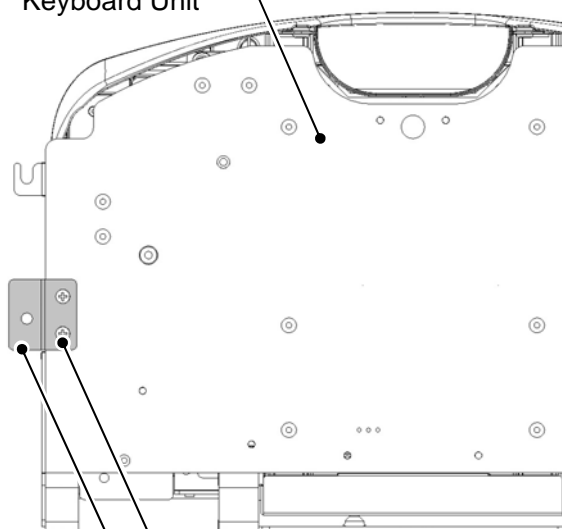

S3x6Fe-Ni-EC, 2


搭載金具 1

Mounting Fixture 1

①-1 搭載金具 1 を取り付け。

①-1 Install the "Mounting Fixture 1" with 2 accessory screws.

### SSD-ARIETTA60 の場合 In the case of SSD-ARIETTA60

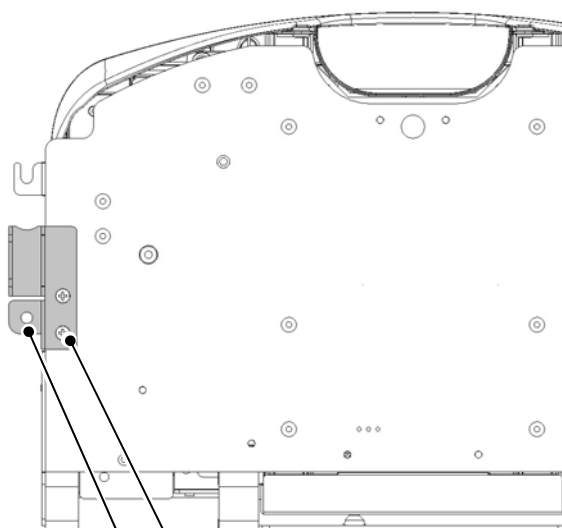

S3x6Fe-Ni-EC, 2


搭載金具 2

Mounting Fixture 2

①-2 搭載金具 2 を取り付け。

①-2 Install the "Mounting Fixture 2" with 2 accessory screws.

## キーボードユニットの取り付け方法 Installation of Keyboard Unit

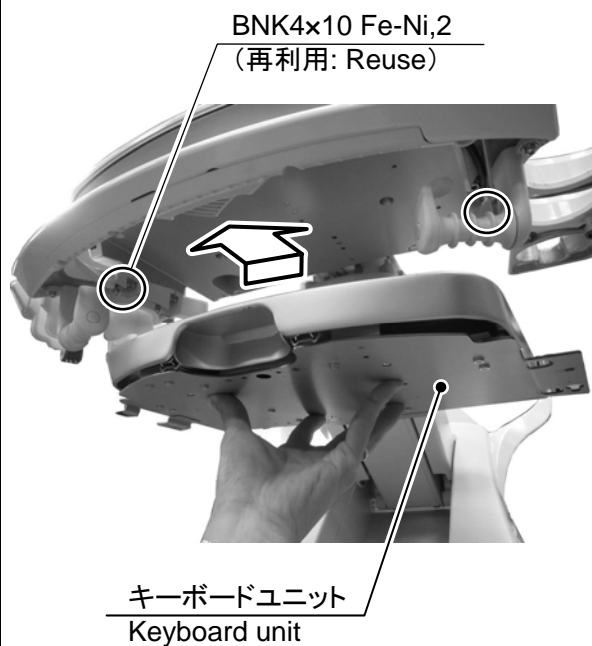

②手順 1-①で緩めたねじへキーボードユニットを引っ掛けて、ねじ 2 本を締める。

※取り付けの際、キーボードユニットを落下させないように手で支えながら作業すること。

②Hook the keyboard unit on the screws that are loosened at 1-① and tighten them.

※Hold on the keyboard unit during this work in order to prevent dropping off.



③手順 1-②で取り外したネジ 2 本で固定する。


③Fix the keyboard unit with 2 screws that were removed at 1-②.




ジャック  
Jack

⑤コネクタを底面のジャックへ接続する。  
※コネクタの矢印が後側へ向くように接続すること。


⑤Connect the keyboard plug to the jack on the bottom of panel base.  
※Plug the connector as the arrow of it faces backward.

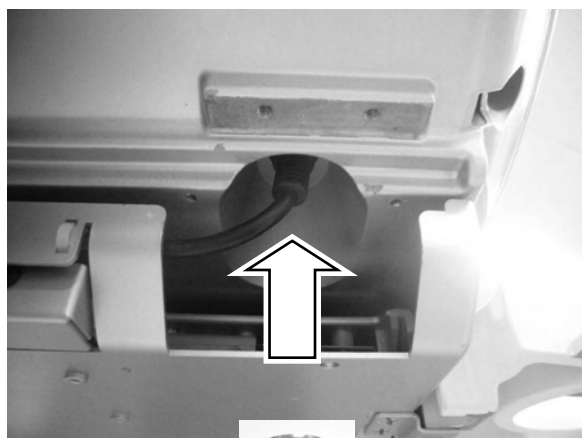

コネクタ  
Connector

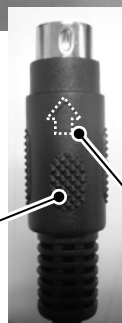


矢印  
arrow

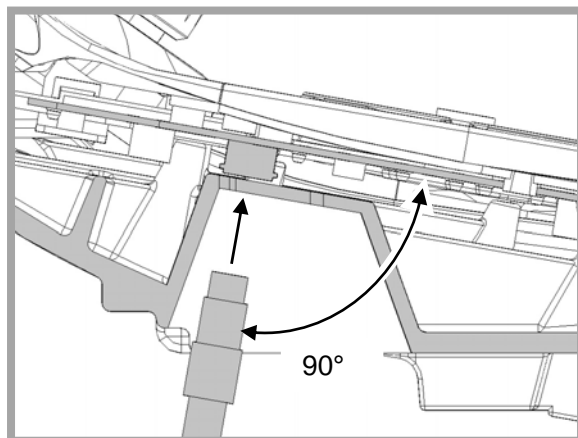

※操作パネルに対し垂直にコネクタを差し込むこと。


※Put the Connector perpendicularly to the operation panel.

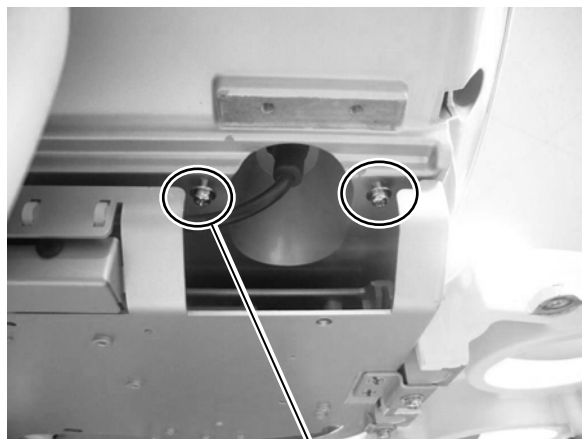

BNK3x8Fe-Ni, 2

⑥ パネルベース底面へネジ 2 本を仮止めする。


⑥ Put 2 screws on the bottom of panel base.

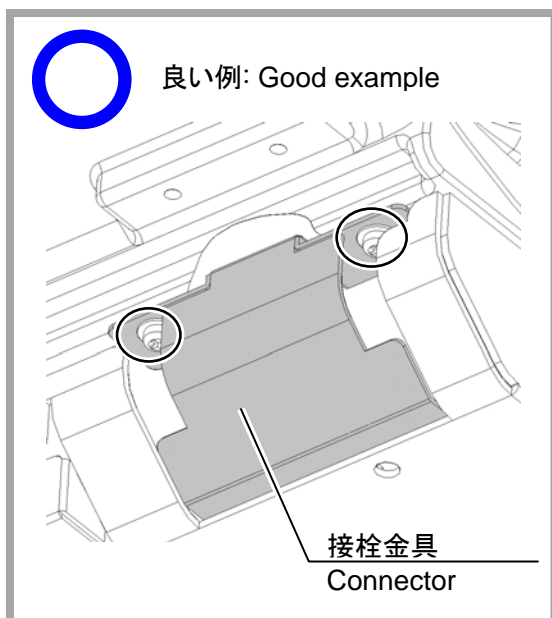

良い例: Good example

⑦ 接栓金具を取り付けて、ネジを本締めする。

⑦ Fix the Connector Cover with 2 screws that temporary put at previous step.

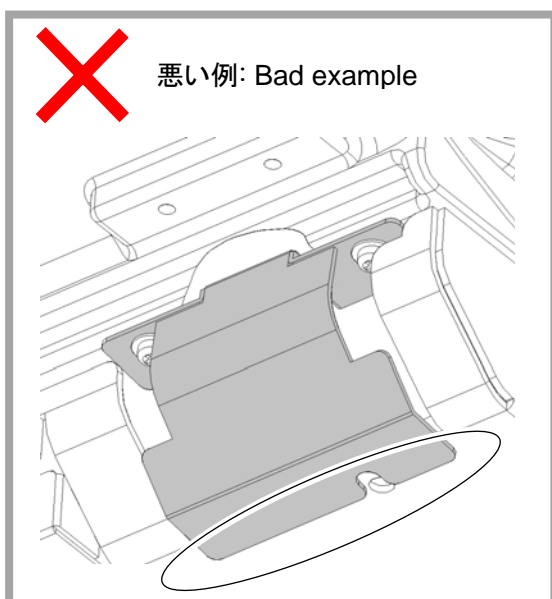

悪い例: Bad example



### 3. 動作確認

### 3. Confirmation of the work

- ①装置が正常に起動し、アルファニューメリックキーボードのキー照光が点灯し、コメント入力が可能なことを確認する。  
※装置操作方法は取扱説明書を参照のこと。

- ①Confirm the following items.

- System boots normally.
- Lighting-up the key lights of alphanumeric keyboard.
- Possibility of comment input from alphanumeric keyboard.

※For the details of operation, refer to the instruction manual.